



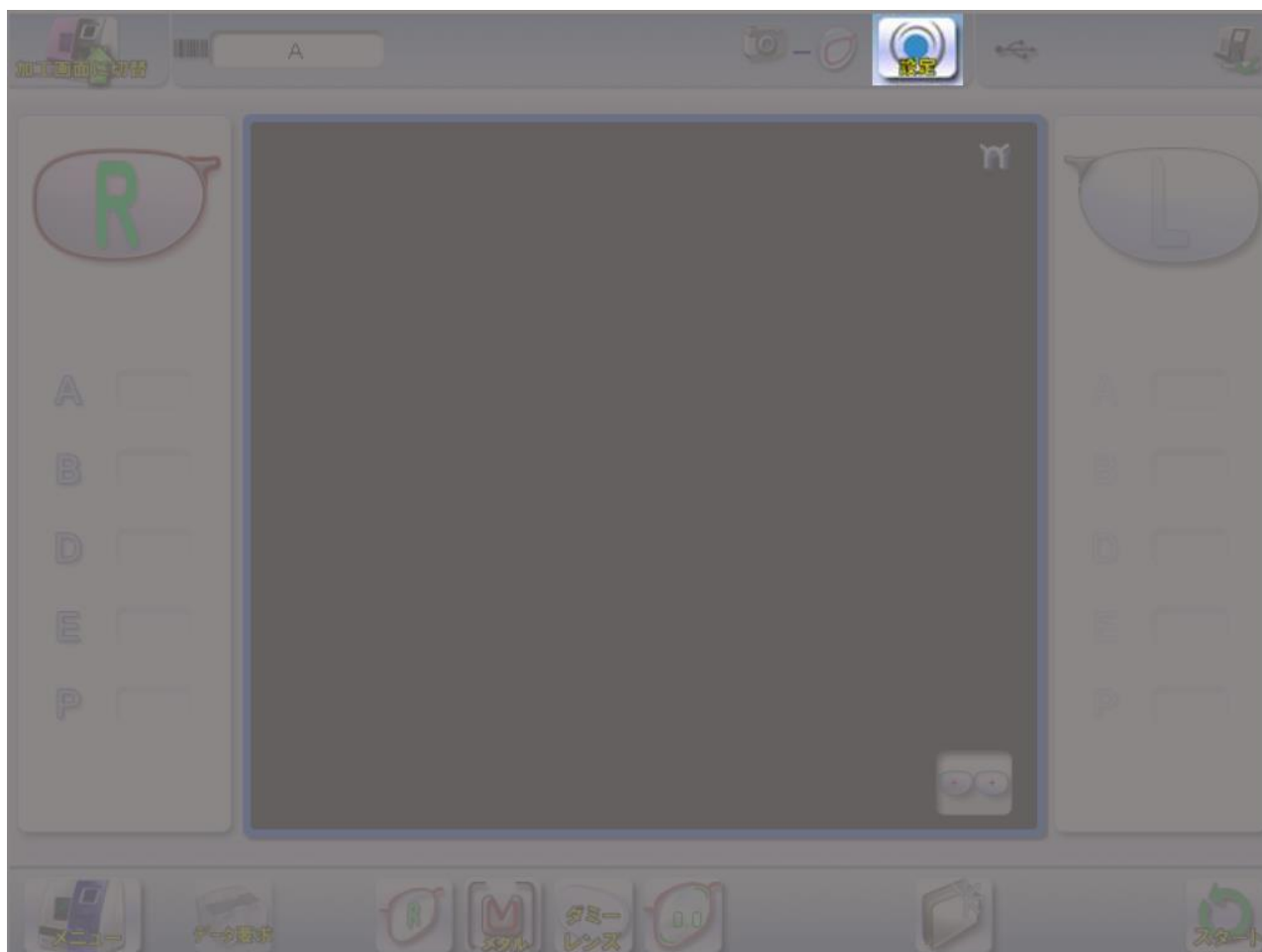
Delta2 で USB メモリにフォルダを作成します。

1. 加工機、後ろ側に USB メモリを差し込みます。
(加工機の付属品内にある USB をお使い下さい。
一部の市販品では USB を認識しない場合があります)

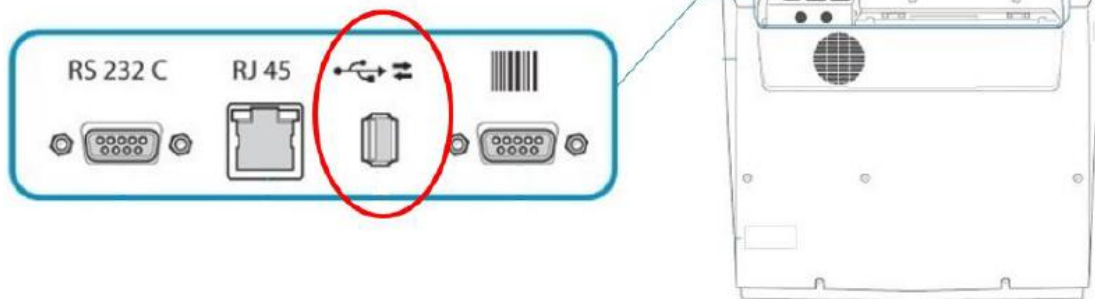


2. 加工機、吸着画面の  を押します。


※画面の枠色が青になっている画面で「設定」を押す




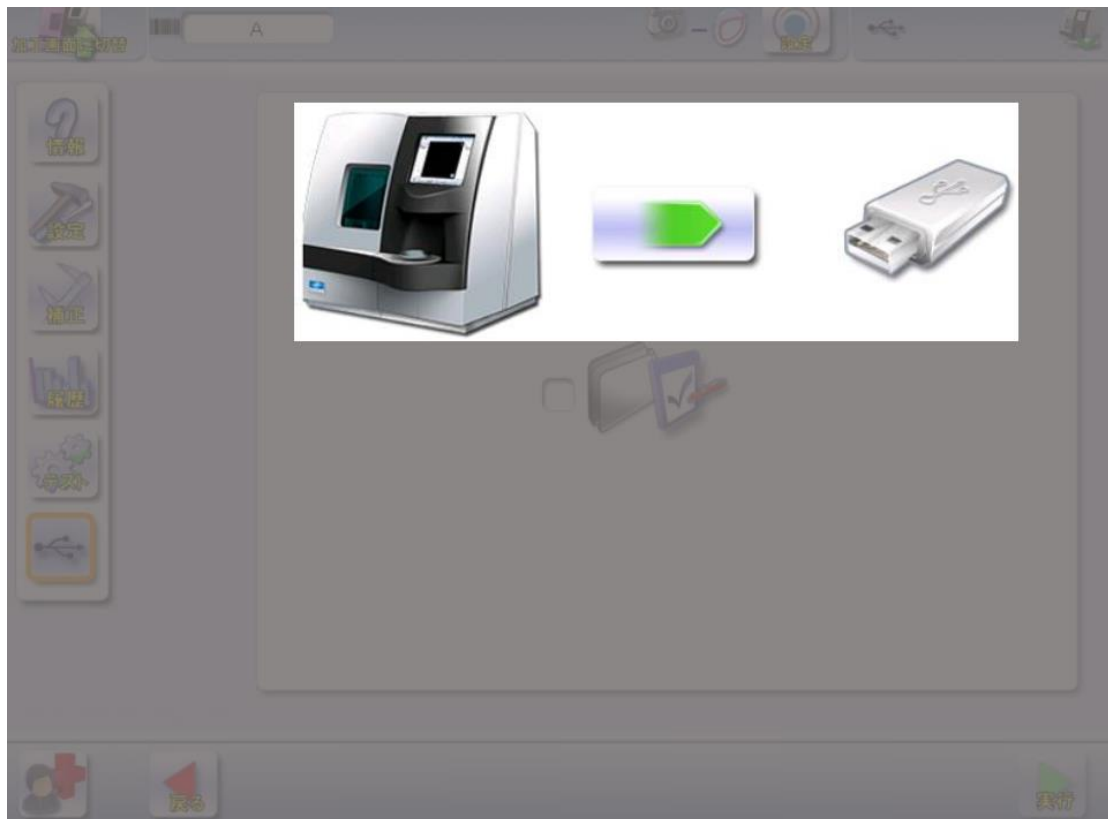
3. を押します。

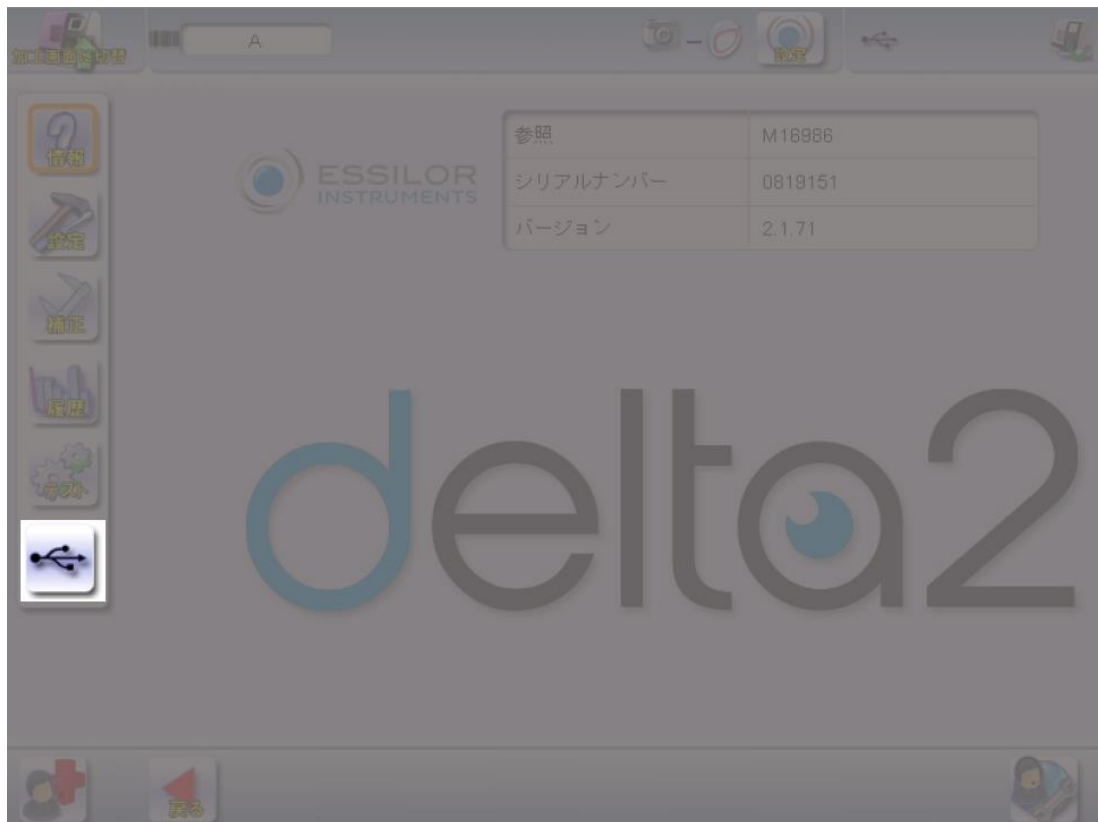


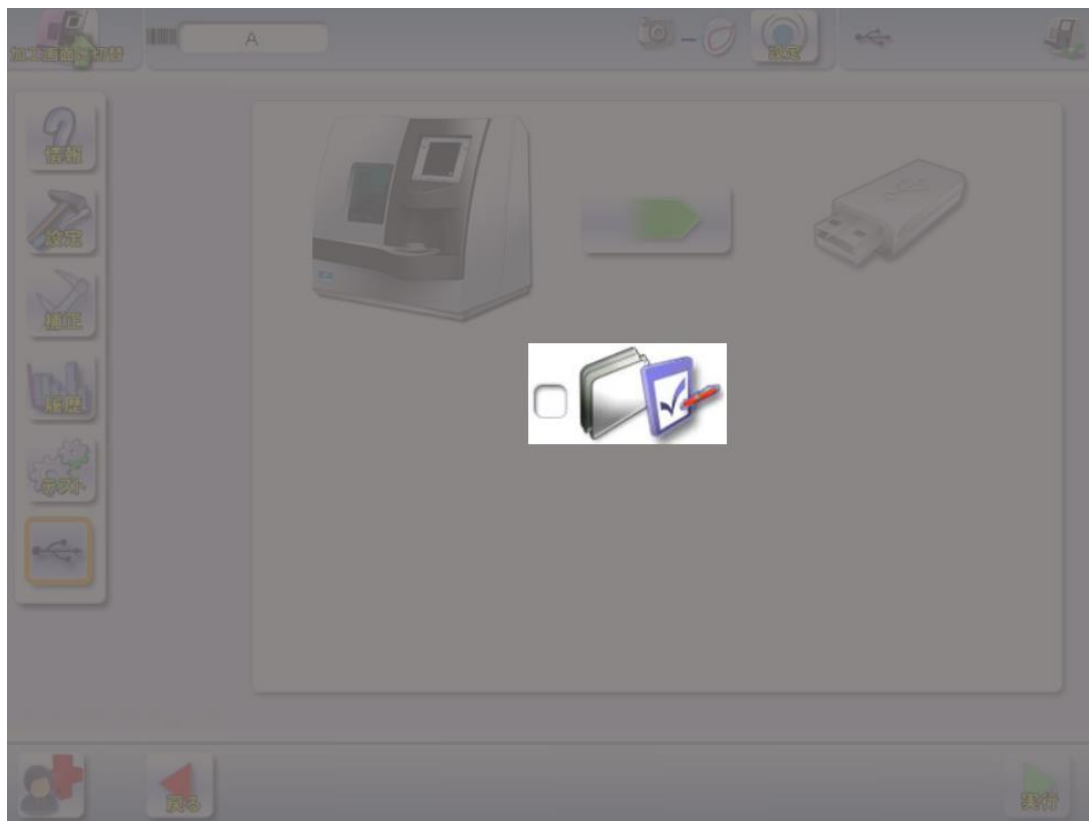
4. を押します。

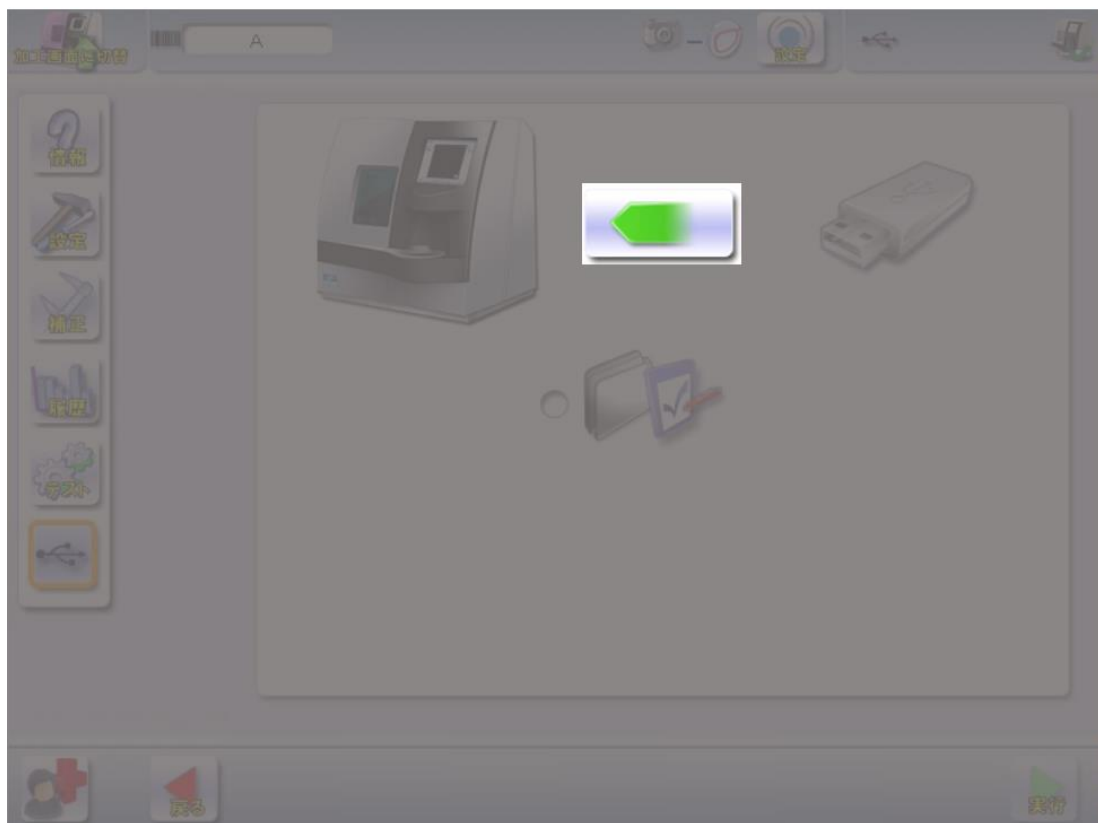



5.  が右に向いていることを確認してください。






6.  を押してチェックを入れます。




7.  チェックが入っていることを確認して、 を押します。

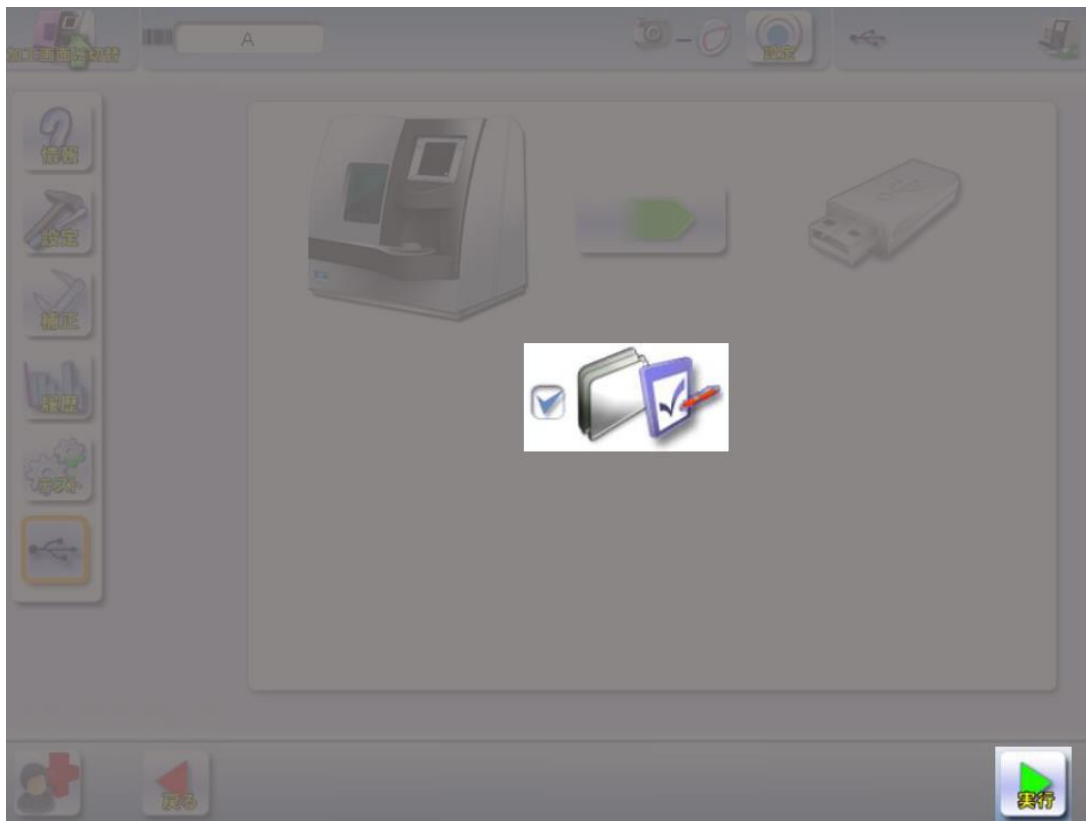その後データの抽出が始まりますのでしばらくお待ちください




8.   チェックが入ったことを確認して USB キーを抜き取ります。

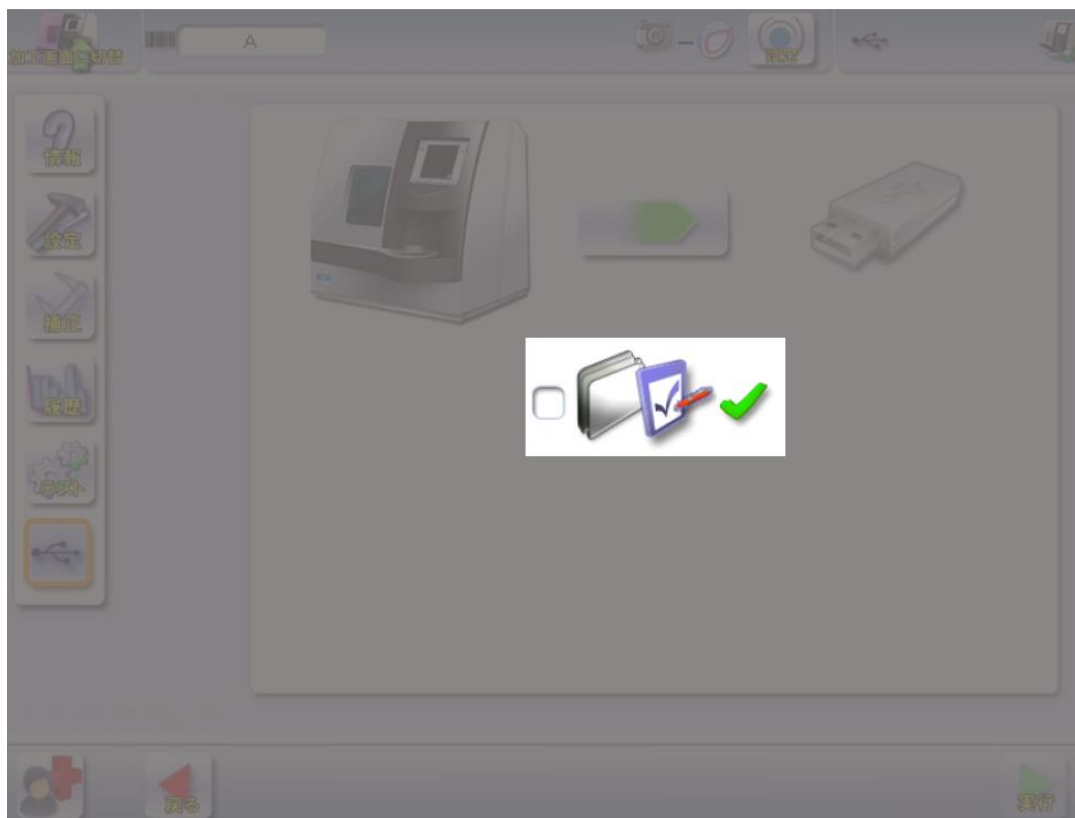

PC でフォルダに玉型データをコピーします。

1. 加工機でフォルダを作成した USB メモリを PC に差し込み
“M16986~”のフォルダをクリックします。

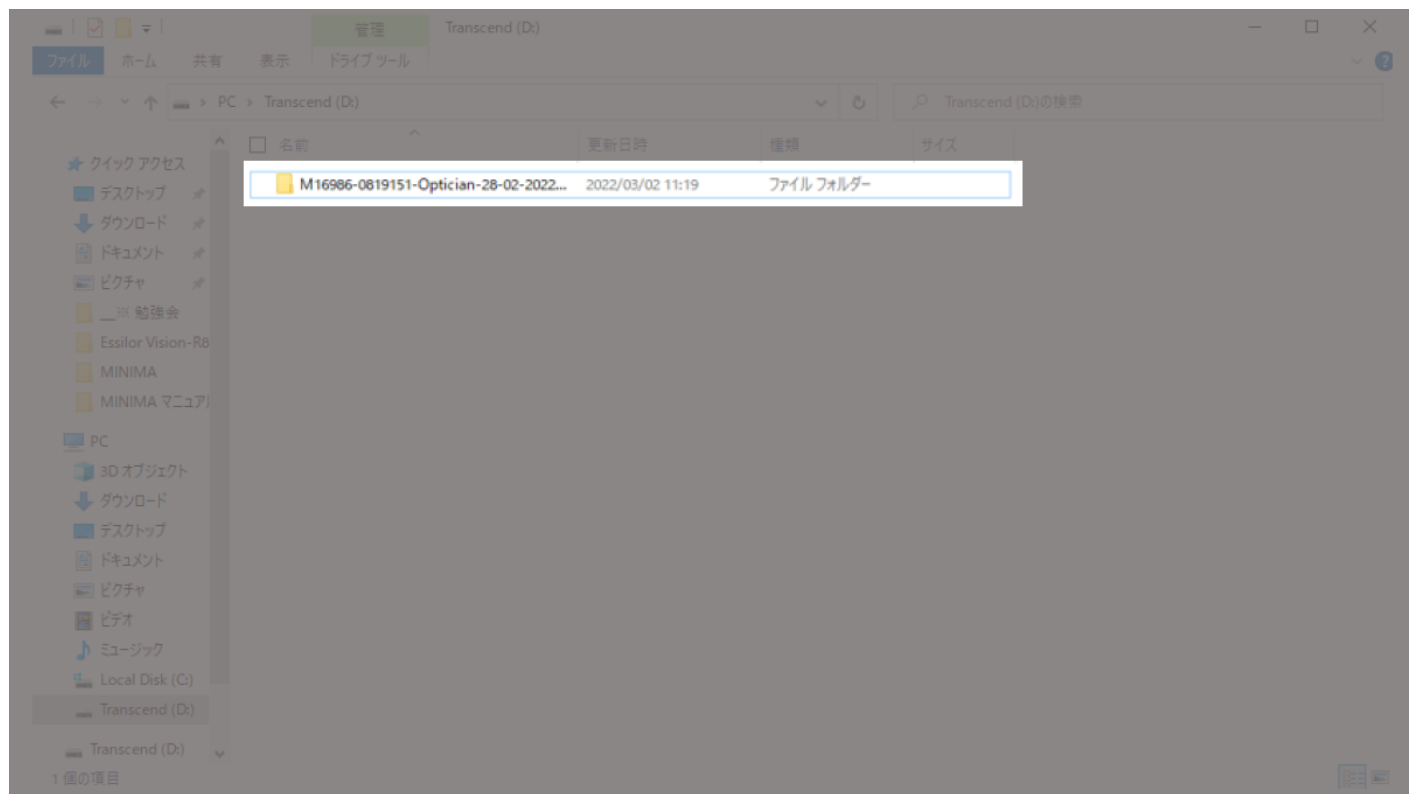


2. “jobs”のフォルダをクリックします。



3. “jobs”フォルダの直下に「MEIGANshop」からダウンロードした玉型データをコピーします。


※「MEIGANshop」からダウンロードしたファイルは Zip ファイルを解凍したうえで、個別データを保存して下さい。Zip ファイルのままですと玉型データをコピーできません。

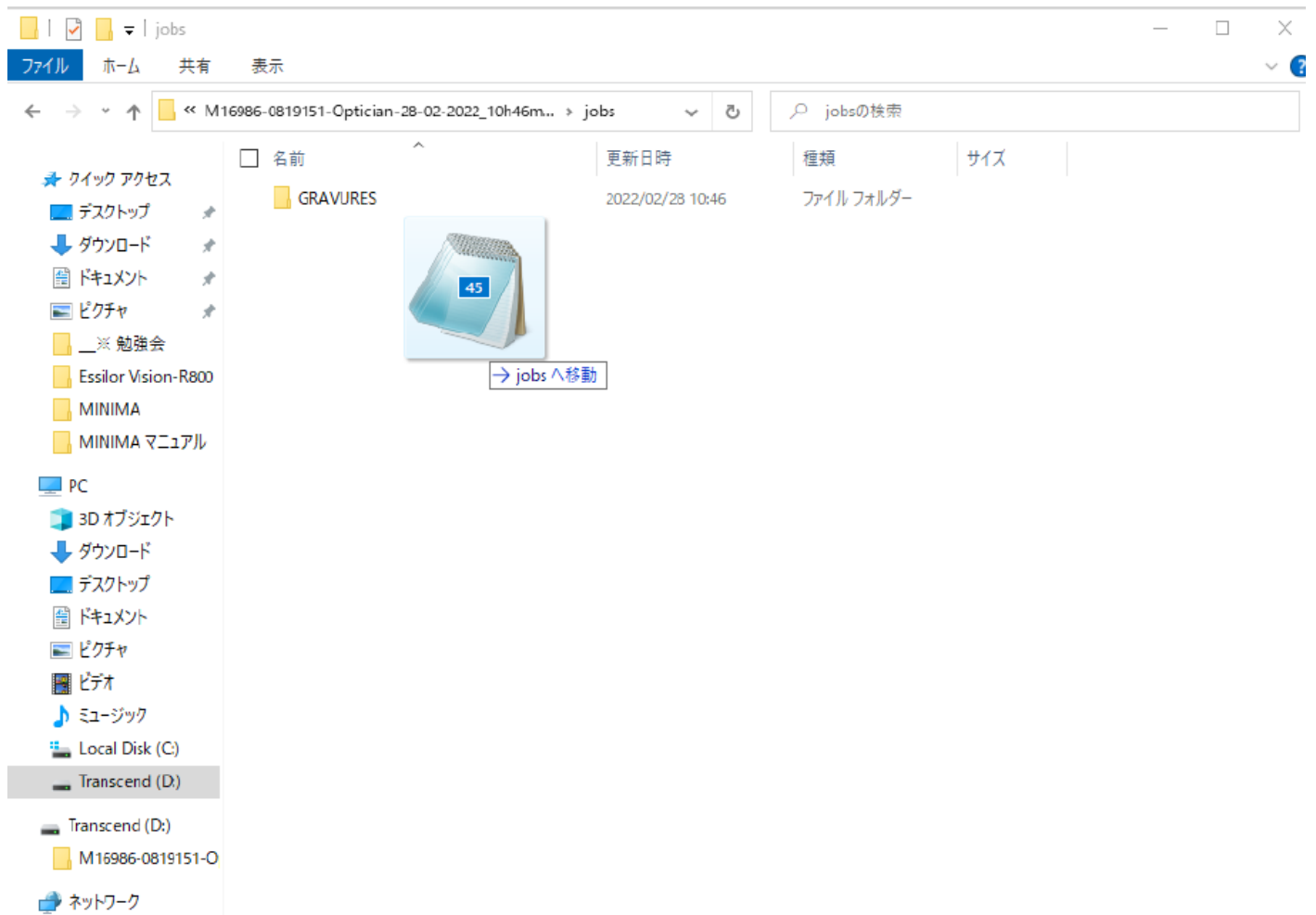


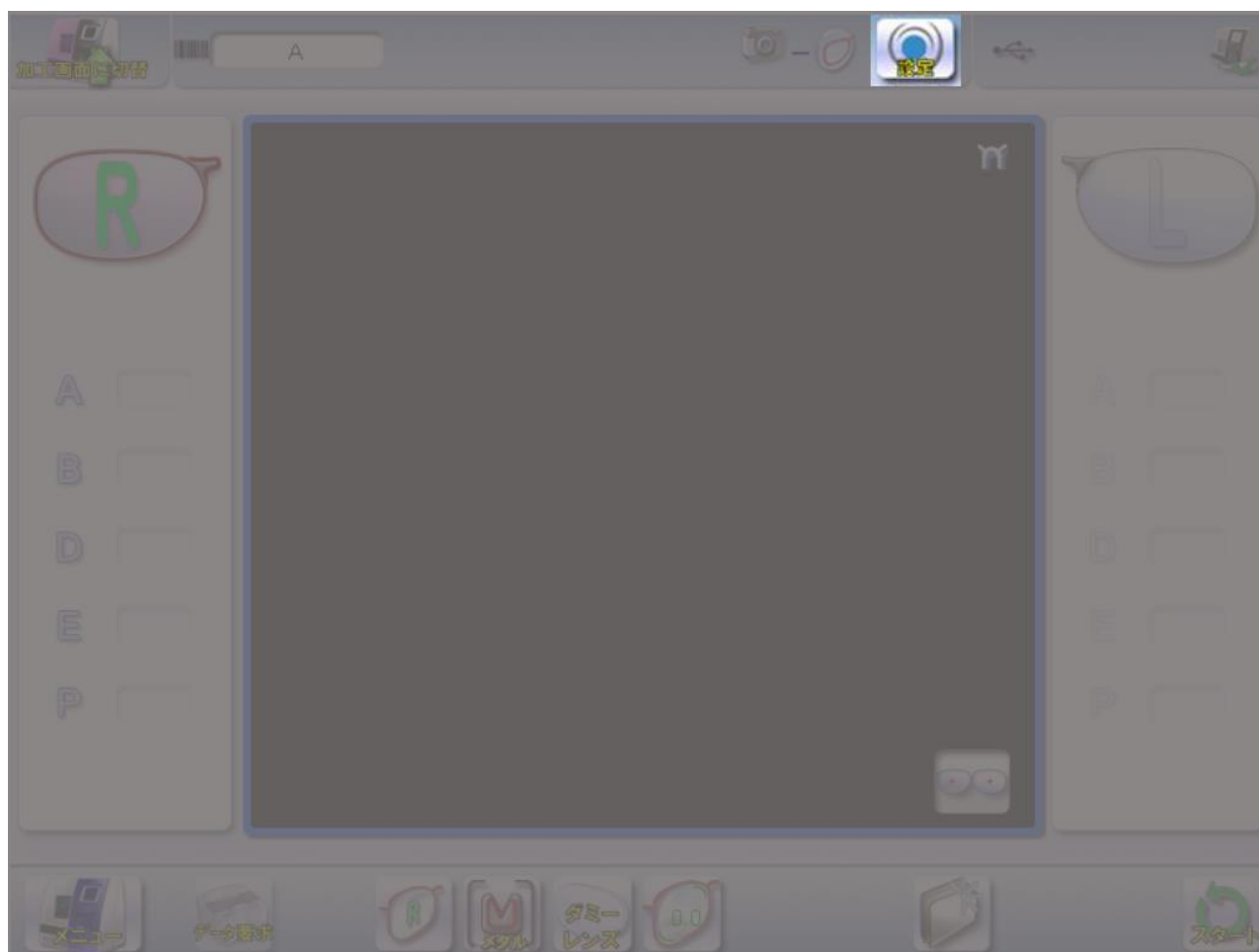
4. コピーが完了したら USB メモリを PC から抜き取ります。

PC でフォルダに玉型データをコピーします。

1. 加工機後ろ側に USB メモリを差し込みます。

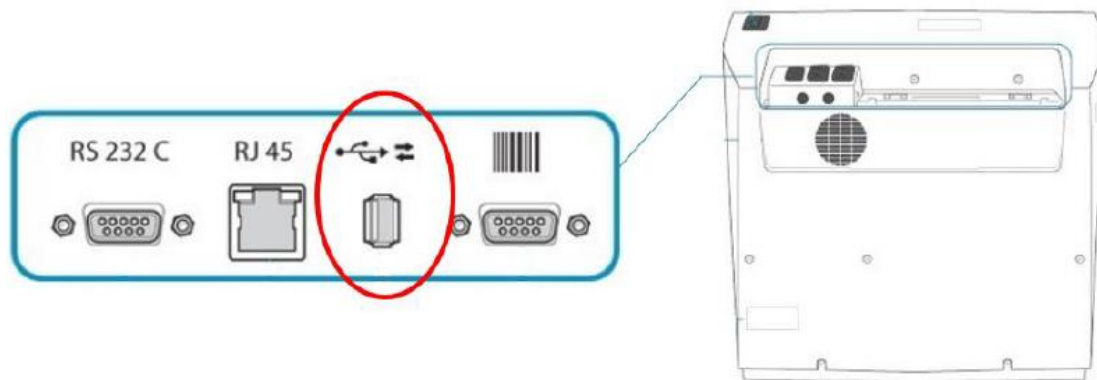


2. 加工機、吸着画面の  を押します。




3. を押します。




4. を押します。

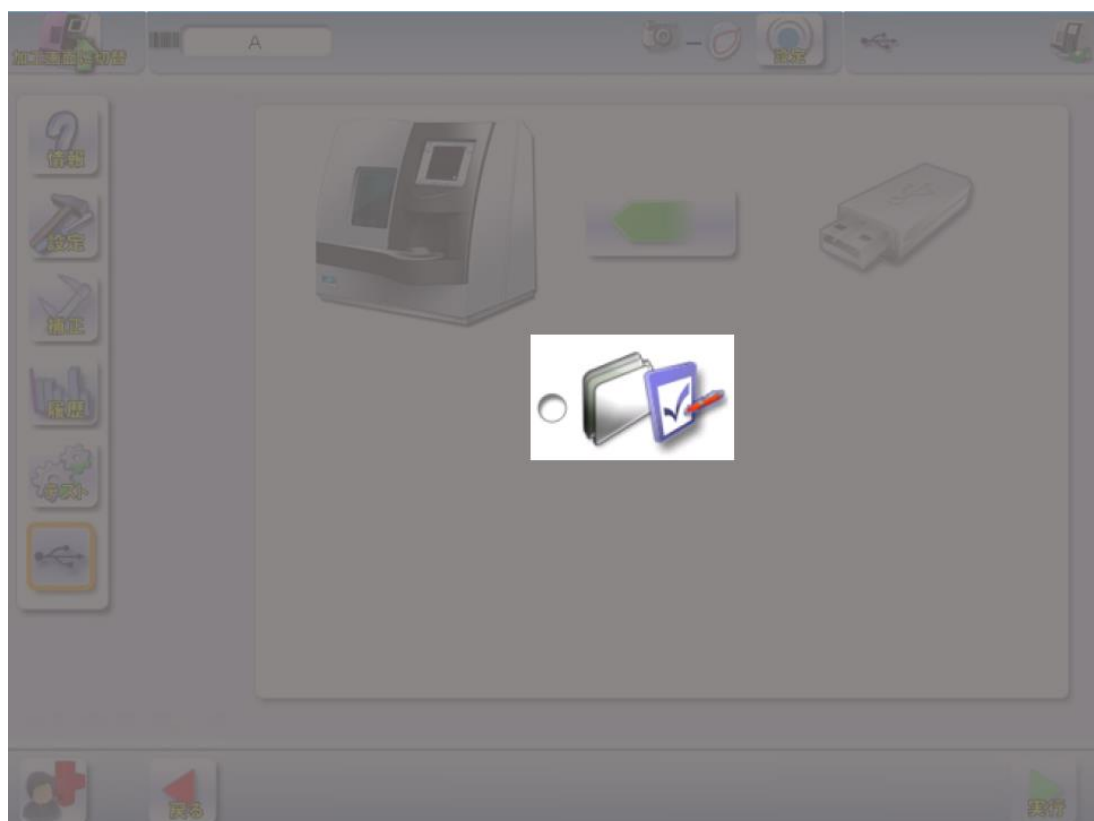


5. PC で玉型をコピーしたフォルダを選択します。

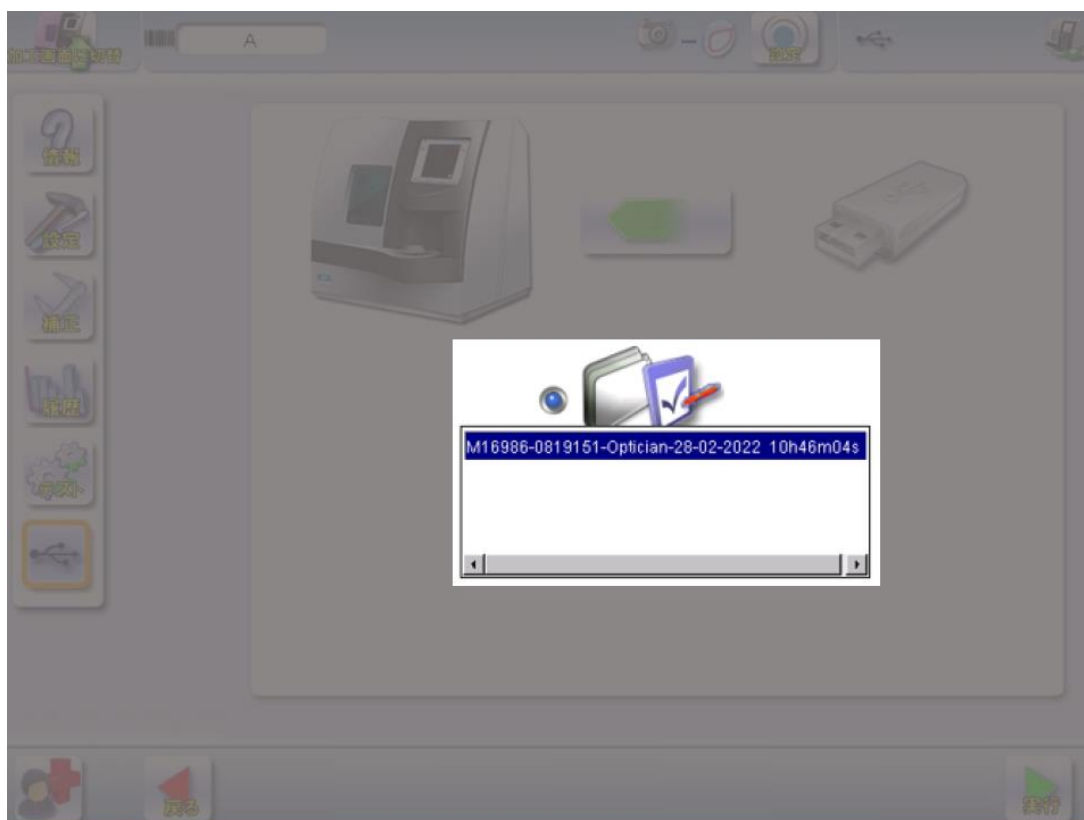


6. 下記メッセージが表示されたら USB メモリを取り外します。
USB メモリを取り外すと自動的に再起動します。

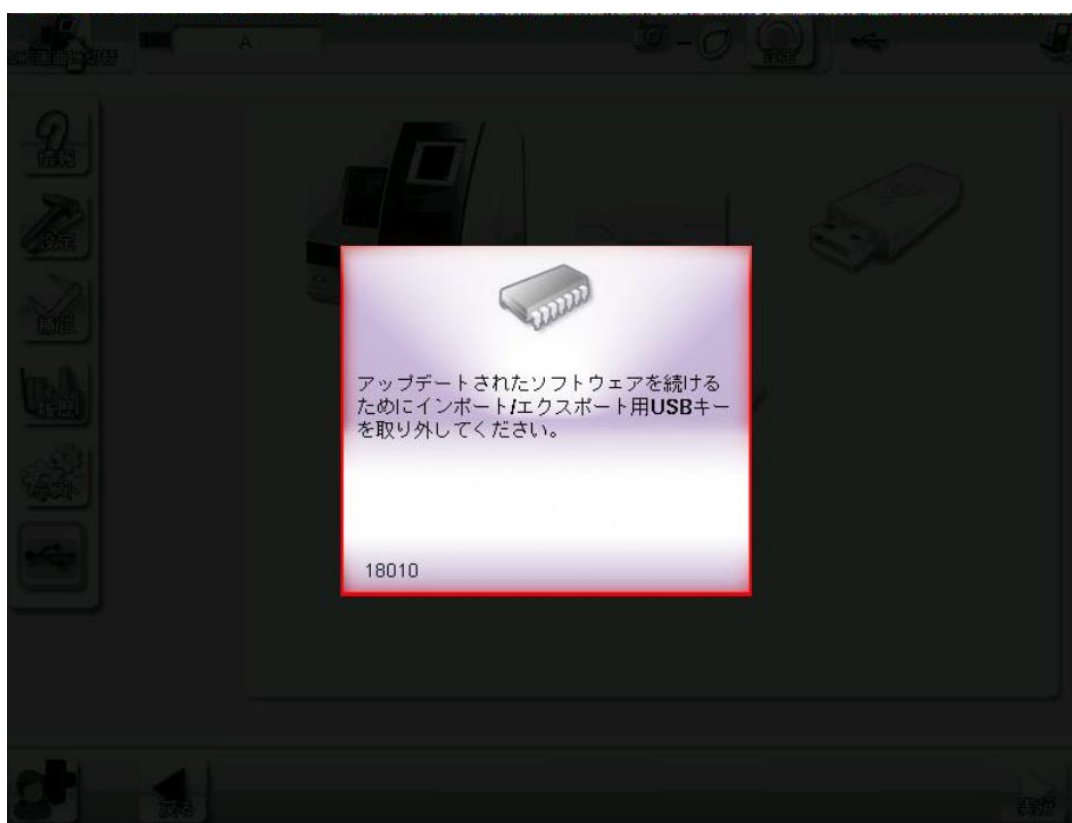


7. を押します。

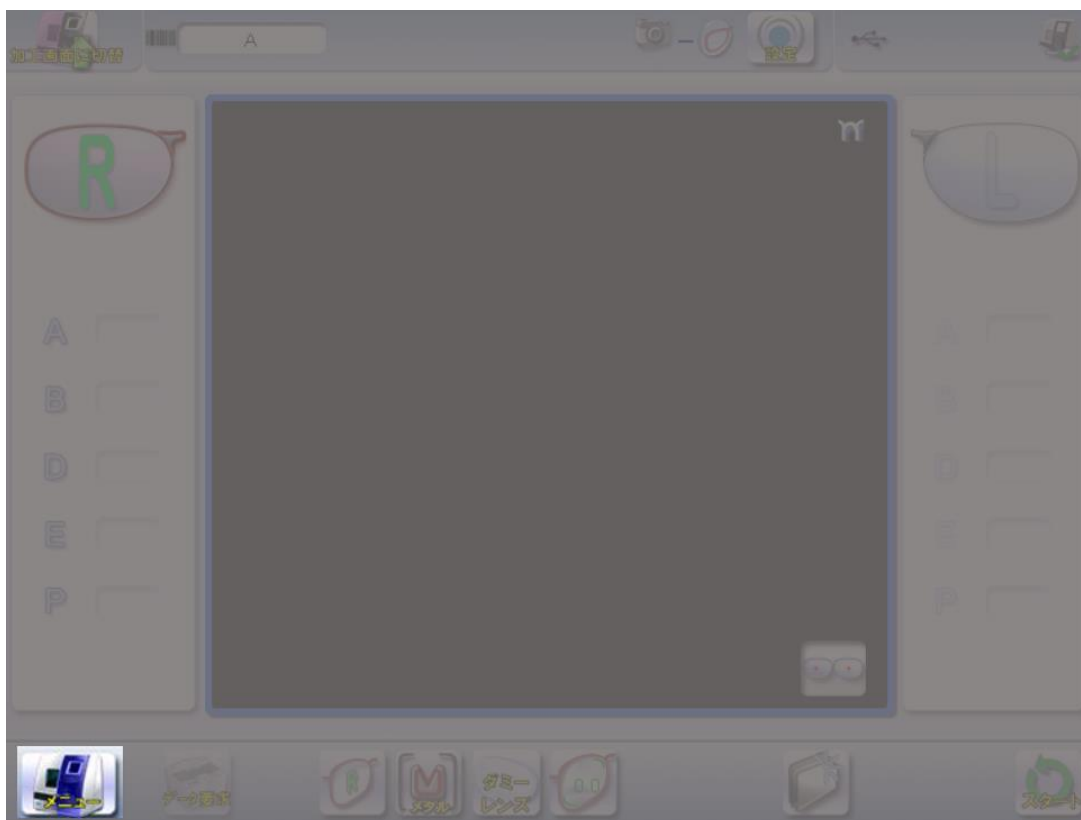

8. をタッチします。

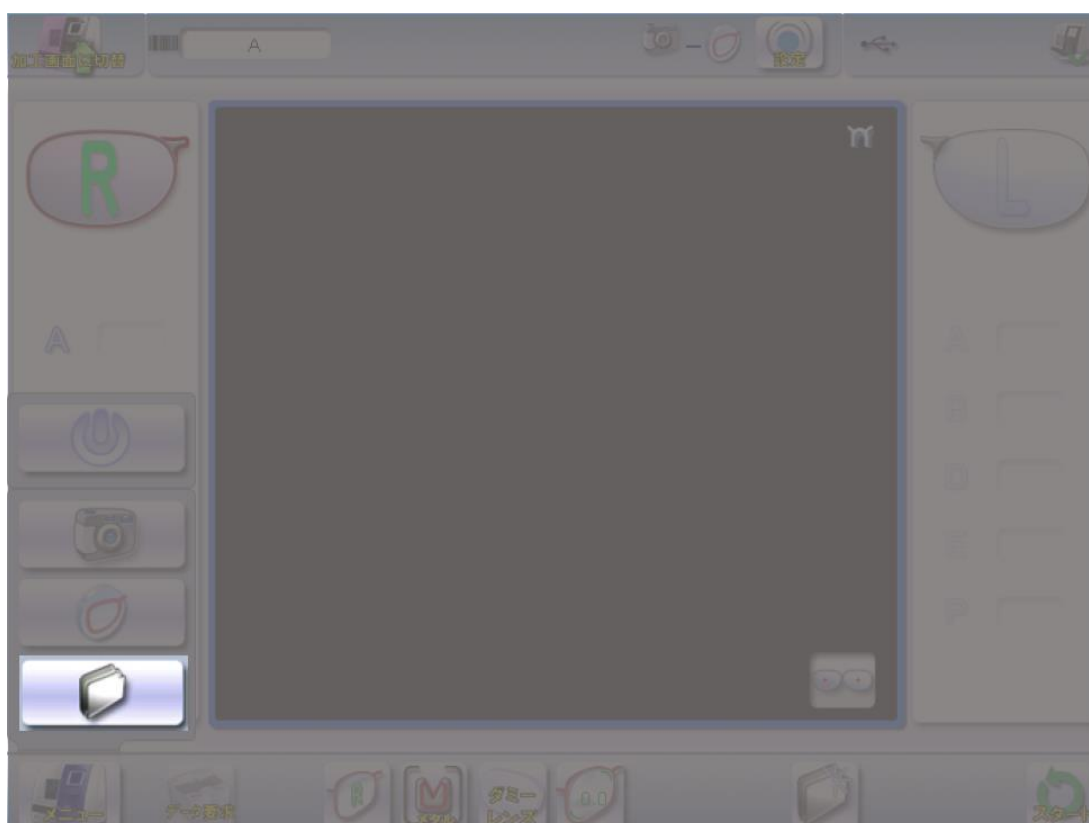

9. 玉型が追加されていれば完了です。

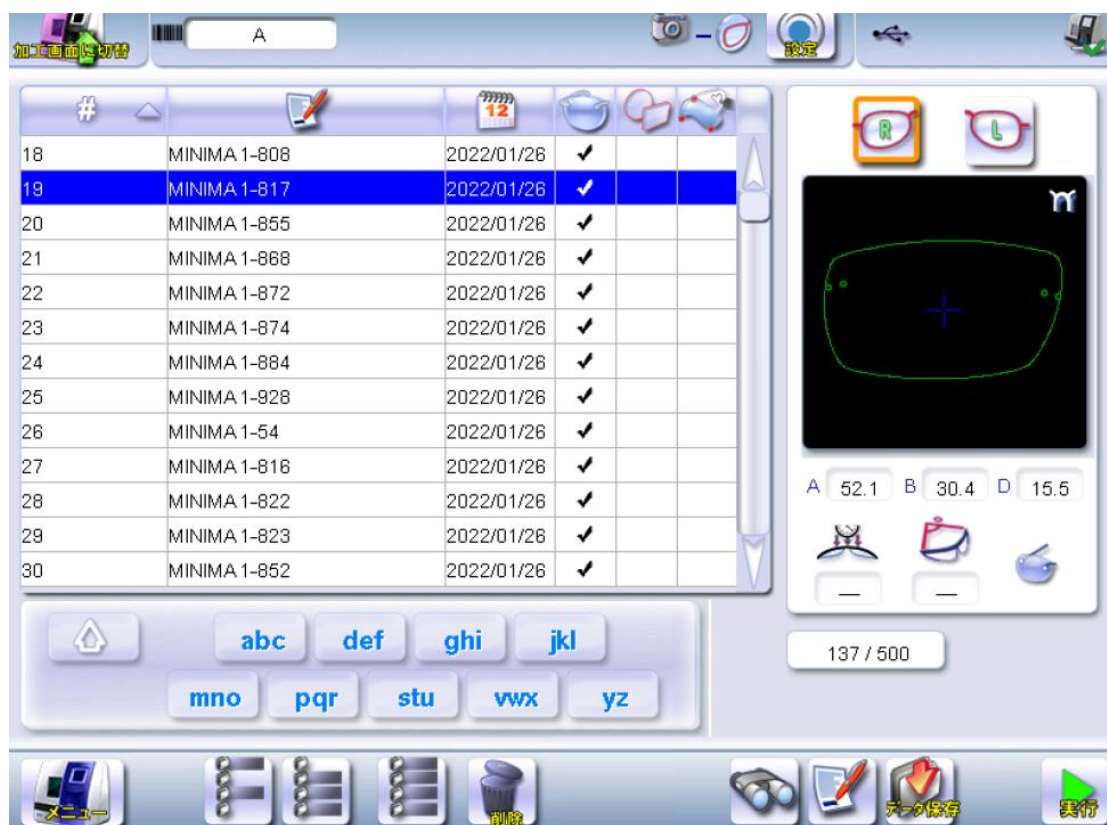

操作に関してご不明な点がございましたら
トプコン眼鏡コールセンター【03-5914-6193】までお問合せください。